

# Used Products

DENTE - Corona - Composito Da Laboratorio - Variolink Esthetic - Syntac

**Variolink Esthetic**

Il sistema di cementazione estetico, con indurimento a luce e duale



**Proxyt priva di fluoro**

Pasta profilattica priva di fluoro



**OptraStick**

Strumento per il posizionamento con punta adesiva flessibile



**Ivoclean**

La pasta detergente universale Ivoclean deterge efficacemente le superfici adesive dei restauri protesici dopo la messa in prova intraorale.



**Monobond Plus**

Monobond Plus è un primer monocomponente universale con tutti i materiali da restauro indiretti



**Total Etch**

Total Etch è un gel mordenzante contenente acido ortofosforico al 37%



**Syntac**

Sistema adesivo a 3 fasi per un'adesione integrale del restauro in composito al dente



**Liquid Strip**

Gel alla glicerina per impedire la formazione dello strato inibito da ossigeno nei compositi durante la cementazione di restauri in composito o ceramica



**OptraPol**

OptraPol il sistema ideale per la rifinitura e lucidatura di tutti i materiali compositi convenzionali in un'unica fase di lavoro



**Fluor Protector**

Fluor Protector è una lacca protettiva per la desensibilizzazione e la profilassi delle carie. Contiene fluoro



# Flowchart Variolink Esthetic

DENTE - Corona - Composito Da Laboratorio - Variolink Esthetic - Syntac

## 1 Rimozione del provvisorio



Rimozione del provvisorio. Rimuovere eventuali residui di cemento provvisorio dalla preparazione mediante spazzolino per lucidatura e pasta per lucidatura priva di olio e fluoro (p.e. **Proxyt privo di fluoro**). Infine, asciugare con soffio d'aria priva di acqua e di olio.

## 2 Messa in prova del restauro



Messa in prova del restauro definitivo. Controllare ora l'effetto cromatico, l'adattamento e l'occlusione del restauro.



Per risultati estetici ottimali, il colore del restauro può essere controllato con le paste **Variolink Esthetic Try-In**. Dopo la messa in prova con le paste Try-In, sciacquare accuratamente ed asciugare il restauro con aria priva di olio e acqua.

### 3 Trattamento superficiale del restauro



Sabbiare secondo le indicazioni del produttore dei materiali del restauro. (p.es. **SR Nexco**, 2 bar,  $Al_2O_3$  100  $\mu m$ ) In alternativa si può irruvidire il restauro con frese diamantate per rifinitura.



Applicare **Monobond Plus** con un pennellino oppure un microbrush sulle superfici pretrattate, lasciare agire per 60 secondi, quindi distribuire con forte getto d'aria.

### 4 Isolamento e detersione della cavità



Per la cementazione adesiva con compositi è indispensabile creare un campo operatorio assolutamente asciutto, preferibilmente con diga di gomma, per esempio **OptraDam**, o in alternativa con rulli salivari e aspirasaliva.



Detergere la preparazione con pennellino per lucidatura e pasta per lucidatura priva di olio e fluoro (p.e. **Proxyl privo di fluoro**). Successivamente detergere nuovamente con spray d'acqua. Infine asciugare con soffio d'aria priva di acqua e di olio. Evitare di asciugare eccessivamente.

5 Pretrattamento della preparazione e applicazione dell'adesivo



Applicare l'acido fosforico (p.es. **Total Etch**) prima sullo smalto preparato e poi sulla dentina. Lasciare agire l'acido per 15-30 secondi sullo smalto e 10-15 secondi sulla dentina.



Quindi sciacquare accuratamente il gel per almeno 5 secondi con forte getto d'acqua ed asciugare con aria compressa finché le zone dello smalto compaiono bianco-gessose.



Applicare **Syntac Primer** sulla cavità con un pennellino e frizionare leggermente. Il tempo di contatto del Syntac Primer con la dentina deve essere di almeno 15 secondi. Distribuire con getto d'aria il Syntac Primer in eccesso e asciugare accuratamente. Non sciacquare!



Applicare **Syntac Adhesive** e lasciare agire per 10 secondi. Successivamente asciugare accuratamente la preparazione con siringa ad aria. Non risciacquare!



Applicare **Heliobond** e distribuire in strato sottile con getto d'aria.

**Heliobond** viene polimerizzato insieme con il materiale da cementazione.


**6** Cementazione del restauro con Variolink Esthetic



Estrudere **Variolink Esthetic DC** dalla siringa automix ed applicare la quantità desiderata direttamente sul restauro.



Posizionare il restauro in situ e mantenerlo fermo esercitando una pressione costante.

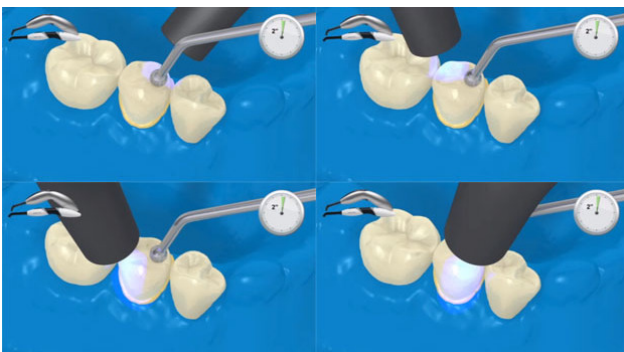


Le eccedenze di cemento vengono fotoattivate con lampada fotopolimerizzante (p.es. **Bluephase Style**) a distanza di max. 10 mm, ogni quarto **per 2 secondi** (mesio-orale, disto-orale, mesio-buccale, disto-buccale).



Le eccedenze allo stato gelatinoso possono essere rimosse agevolmente con uno scaler.



**Variolink Esthetic**, come tutti i compositi, è soggetto ad inibizione da ossigeno. Per evitare questo, subito dopo la rimozione delle eccedenze, si consiglia di coprire i bordi del restauro con un gel di glicerina/Airblock (p.es. **Liquid Strip**).

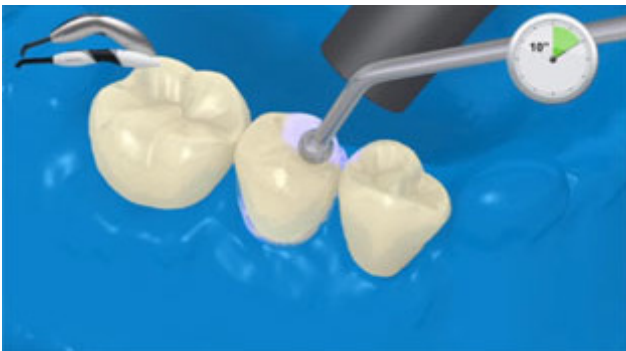

Se si utilizza una lampada fotopolimerizzante con intensità luminosa di almeno  $1000 \text{ mW/cm}^2$ , fotopolimerizzare il composito per 10 secondi per mm di spessore e segmento (p.e. **Bluephase Style**).



Rimuovere **Liquid Strip** con getto d'acqua e togliere la diga di gomma.

7 Rifinitura del restauro ultimato



Rifinire le aree interprossimali con strisce per rifinitura e lucidatura. Controllare l'occlusione e i movimenti funzionali ed eventualmente apportare le necessarie correzioni. Lucidare i margini del restauro con gommini (**OptraPol**) o dischi.

8 Fluorizzazione



Applicazione di un sottile strato di **Fluor Protector** mediante Vivabrush o pennellino. Distribuire uniformemente e asciugare la lacca con getto d'aria.