

Used Products

DENTE - Ponte - Disilicato di litio - Preparazione ritentiva - Sopragengivale Equigengivale - Margine non visibile - Vivaglass CEM

☐ **VivaglassCEM PL**

Vivaglass CEM PL è un cemento vetroionomerico, autoindurente, ad elevata trasparenza



☐ **Proxyl priva di fluoro**

Pasta profilattica priva di fluoro



☐ **OptraStick**

Strumento per il posizionamento con punta adesiva flessibile



☐ **OptraGate**

Esso consente di mantenere completamente retratte labbra e guance e di garantire un campo operatorio asciutto



☐ **OptraPol**

OptraPol il sistema ideale per la rifinitura e lucidatura di tutti i materiali compositi convenzionali in un'unica fase di lavoro



☐ **Fluor Protector**


Fluor Protector è una lacca protettiva per la desensibilizzazione e la profilassi delle carie. Contiene fluoro



Flowchart Vivaglass CEM

DENTE - Ponte - Disilicato di litio - Preparazione ritentiva - Sopragengivale Equigengivale - Margine non visibile - Vivaglass CEM

1 Rimozione del provvisorio

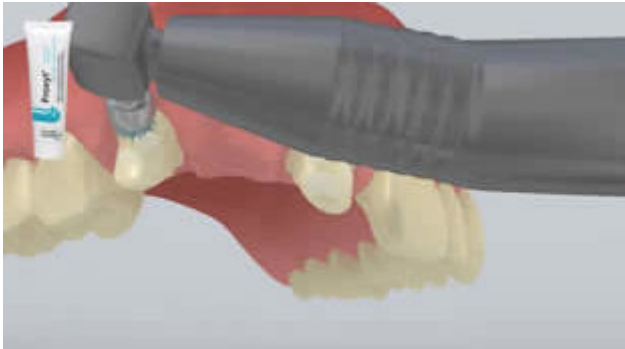

Rimozione del provvisorio. Rimuovere eventuali residui di cemento provvisorio dalla preparazione mediante spazzolino per lucidatura e pasta per lucidatura priva di olio e fluoro (p.e. **Proxyl privo di fluoro**). Infine, asciugare con soffio d'aria priva di acqua e di olio.

2 Messa in prova del restauro




Messa in prova del restauro definitivo. Controllare ora l'effetto cromatico, l'adattamento e l'occlusione del restauro.

3 Trattamento superficiale del restauro



Mordenzare con acido fluoridrico al 5% (p.es. **IPS Ceramic gel** mordenzante) per 20 secondi.

4 Isolamento e detersione della cavità

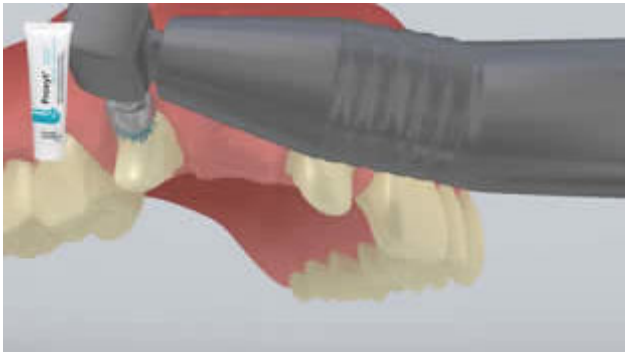

Detergere la preparazione con pennellino per lucidatura e pasta per lucidatura priva di olio e fluoro (p.e. **Proxyl privo di fluoro**). Successivamente detergere nuovamente con spray d'acqua. Infine asciugare con soffio d'aria priva di acqua e di olio. Evitare di asciugare eccessivamente.

5 Miscelazione e applicazione di Vivaglass CEM



Miscelare **Vivaglass CEM** polvere e liquido in rapporto 1:1. Nella cementazione di un ponte, il quantitativo di materiale viene aumentato in base al numero di monconi coinvolti.



Applicare il materiale da cementazione nel restauro con una spatola o un pennello.

6 Cementazione del restauro e rimozione del cemento in eccesso




Posizionare il restauro in situ e mantenerlo fermo esercitando una pressione costante.



Dopo il completo indurimento del cemento, eliminarne le eccedenze per esempio con uno scaler. Il tempo di presa è di 4-6 minuti.

7 Rifinitura del restauro ultimato

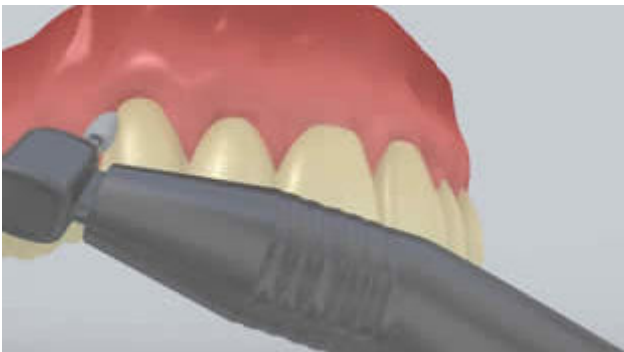

Rifinire le aree interprossimali con strisce per rifinitura e lucidatura. Controllare l'occlusione e i movimenti funzionali ed eventualmente apportare le necessarie correzioni. Lucidare i margini del restauro con gommini (**OptraPol**) o dischi.

8 Fluorizzazione



Applicazione di un sottile strato di **Fluor Protector** mediante Vivabrush o pennellino. Distribuire uniformemente e asciugare la lacca con getto d'aria.