

Used Products

IMPLANTES - Abutment feito de Óxido de Zirconia - Coroas - Metal - Formato Não Retentivo de Abutment - Multilink Speed

☐ **Multilink Speed**

Cimento resinoso autoadesivo, autopolimerizável, com opção fotopolimerizável



☐ **OptraStick**

Acessório que possui uma ponta adesiva flexível



☐ **Telio CS Inlay**

Material restaurador provisório fotopolimerizável para preparos para inlay com paredes paralelas e selamento do acesso do parafuso de implantes



☐ **OptraGate**

Ele permite a retração completa dos lábios e bochechas garantindo isolamento



☐ **Ivoclean**

A pasta de limpeza universal Ivoclean limpa efetivamente as superfícies de adesão de restaurações protéticas após a prova intraoral



☐ **Liquid Strip**

Gel de Glicerina evita a formação da camada inibidora de oxigênio de compósitos com restaurações compostas e de cerâmica



☐ **OptraPol**

OptraPol é perfeitamente adequado para o acabamento e polimento de todos os materiais compósitos mais populares em uma única etapa



☐ **Cervitec Plus**

Verniz de proteção contendo clorexidina e timol, protege superfícies radiculares expostas e faz um controle bacteriano



fluxograma Multilink Speed

IMPLANTES - Abutment feito de Óxido de Zircônia - Coroas - Metal - Formato Não Retentivo de Abutment - Multilink Speed

1 Situação Pré-operatória



O abutment é parafusado no lugar.

2 A restauração é testada



A restauração definitiva é provada na cavidade. Nesta fase, a cor, a adaptação e a oclusão da restauração são verificadas.

3 A abertura de acesso ao parafuso e limpa e selada



A abertura de acesso ao parafuso é cuidadosamente lavada com spray de água e seca com ar isento de óleo. Posteriormente, a abertura de acesso ao parafuso é selada com algodão ou uma bolinha de espuma e **Telio CS Inlay**. Para todas as outras medidas do tratamento, o isolamento do campo operatório, por exemplo, com OptraGate, é indispensável. Um fio retrator pode opcionalmente ser colocado.

4 A restauração é pre-tratada




As superfícies internas da restauração são jateadas (e.g. **IPS InLine, 2 bar, Al₂O₃ 100 µm** ou conforme recomendado pelo fabricante dos materiais restauradores).

5 Aplicação do Multilink Speed




O **Multilink Speed** é dispensado da seringa automix e a quantidade desejada é aplicada diretamente sobre a restauração.

6 A restauração é posicionada e o excesso de cimento é removido

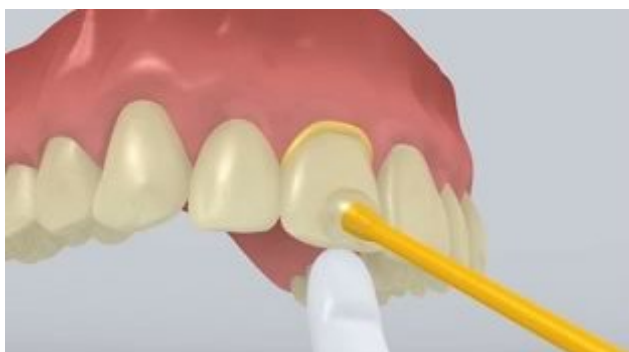

A restauração é posicionada e mantida no local utilizando uma pressão leve e constante.

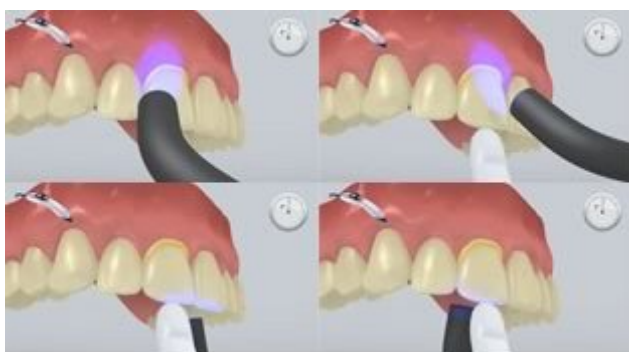


O excesso de cimento é fotopolimerizado com uma unidade de polimerização (ex.: **Bluephase N**, 650 mW/cm², o modo **LOW**) por 1 segundo por quadrante (mesio-lingual, disto-lingual, méso-vestibular, disto-vestibular), a uma distância aprox. de 0-10 mm.



O excesso de material com aparência de gel pode ser facilmente removido com uma cureta de implante



Como todos os compósitos, **Multilink Speed** é sujeito à inibição pelo oxigênio. A fim de evitar este problema, é aconselhável cobrir as margens da restauração, com uma camada de gel de glicerina (ex.: **Liquid Strip**) imediatamente após a remoção do excesso de cimento.

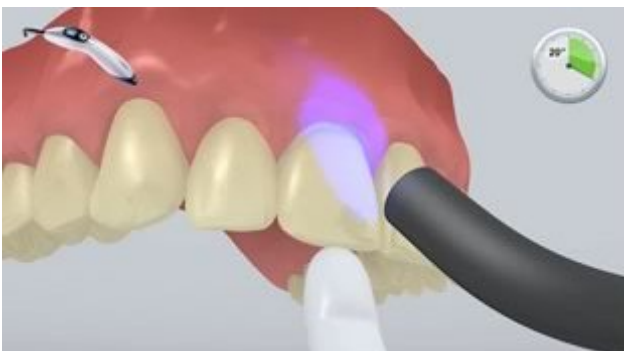

Em seguida, todas as margens do cimento são fotopolimerizadas por 20 seg. (ex.: **Bluephase N** no modo **HIGH**, aprox. 1.200 mW/cm²). Materiais que são opacos, em outras palavras, onde não ocorre a passagem da luz, deve-se permitir o tempo de autopolimerização do cimento.



O **Liquid Strip** é enxaguado e onde foi necessário o uso do OptraGate, os absorventes higiênicos e os fios afastadores, são removidos.

7 A restauração completa é concluída.



As áreas interproximais são ajustadas com tiras de acabamento e polimento. A oclusão e movimentos funcionais são checados e ajustados, e necessário. As margens da restauração são polidas com pontas polidoras (**OptraPol**) ou discos.

8 Cuidado Pós-Operatório



Uma fina camada de **Cervitec Plus** é aplicada onde é necessário, com a ajuda de um aplicador Vivadent ou um pincel. O verniz assenta sozinho ou com a aplicação de um jato de ar.