

Используемые продукты

Имплант - абатмент из оксида циркония - мостовидный протез - Оксидная керамика - ретенционная форма абатмента - Боковой зуб - Vivaglass CEM

☐ VivaglassCEM PL

VivaglassCEM PL высокопрозрачный самоотверждающийся рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент



☐ OptraStick

Инструмент для нанесения, имеющий гибкую клеевую насадку



☐ Telio CS Inlay

Временный светоотверждаемый реставрационный материал для глубоких полостей под вкладки (inlay) с параллельными стенками и для закрытия шахт абатментов



☐ OptraGate

Позволяет удерживать губы и щеки и обеспечивает относительную изоляцию



☐ Ivoclean

Универсальная чистящая паста Ivoclean эффективно очищает адгезивные поверхности протетических реставраций после внутриротовой примерки



☐ OptraPol

OptraPol превосходно подходит для финишной обработки и полировки всех известных композитных материалов в один этап



☐ Cervitec Plus

Защитный лак, содержащий хлоргексидин и тимол, для защиты обнаженных корней зубов и контролирует рост бактерий



Схема Vivaglass CEM

Имплант - абатмент из оксида циркония - мостовидный протез - Оксидная керамика - ретенционная форма абатмента - Боковой зуб - Vivaglass CEM

1 Предоперационная ситуация



Абатмент фиксируется винтом.

2 Примерка реставрации




Проводится примерка постоянной реставрации. На данном этапе проверяется цвет, точность посадки и окклюзия реставрации.

3 Канал доступа к винту почищен и запечатан.



Детергере а fondo il canale filettato dell'abutment con spray d'acqua e asciugare con soffio d'aria privo di acqua e di olio. Successivamente sigillare il canale filettato dell'abutment con cotone, o batuffolino di spugna assorbente e **Telio CS Inlay**. Per le successive fasi del trattamento è necessario garantire un completo isolamento del campo operatorio, p.e. con **OptraGate**. E' previsto l'uso opzionale di un filo di retrazione.

4 Подготовка реставрации

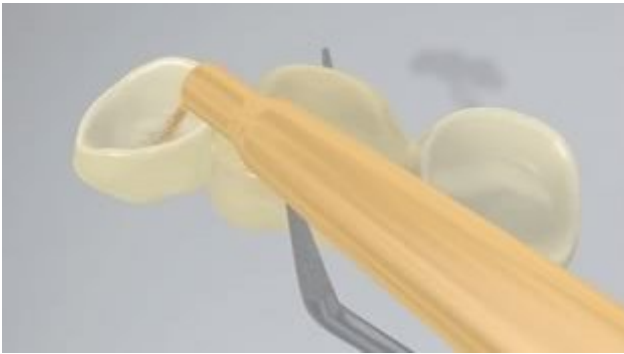

Внутренняя поверхность реставрации подвергается пескоструйной обработке (например, **IPS e.max ZirCAD**, 1 бар, Al_2O_3 100 μm или в соответствии с указаниями производителя реставрационных материалов).

5 Vivaglass CEM замешивается и наносится



Vivaglass CEM порошок и жидкость замешиваются в соотношении 1:1. Для фиксации мостовидного протеза количество материала увеличивается в соответствии с количеством опорных зубов.



Фиксирующий материал наносится на реставрацию при помощи шпателя или кисточки.

6 Реставрация установлена, излишки цемента удалены



Реставрация установлена и удерживается на месте при помощи постоянного легкого давления.



Как только цемент окончательно затвердел, излишки можно удалить, например, при помощи имплантационного скейлера. Установочное время примерно 4-6 минут.

7 Финишная обработка зафиксированной реставрации



Проксимальные участки корректируются финирами и полирами. Окклюзия и функциональные движения проверяются и корректируются в случае необходимости. Края реставрации полируются полирами (**OptraPol**) или дисками.

8 Последующий уход



Наносится тонкий слой **Cervitec Plus**, где необходимо при помощи аппликатора Vivadent или кисточки. Лак распределяется сам или при помощи струи воздуха.