

Используемые продукты

Имплант - абатмент из оксида циркония - коронка - Оксидная керамика - ретенционная форма абатмента - Боковой зуб - Vivaglass CEM

☐ **VivaglassCEM PL**

VivaglassCEM PL высокопрозрачный самоотверждающийся рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент



☐ **OptraStick**

Инструмент для нанесения, имеющий гибкую клеевую насадку



☐ **Telio CS Inlay**

Временный светоотверждаемый реставрационный материал для глубоких полостей под вкладки (inlay) с параллельными стенками и для закрытия шахт абатментов



☐ **OptraGate**

Позволяет удерживать губы и щеки и обеспечивает относительную изоляцию



☐ **Ivoclean**

Универсальная чистящая паста Ivoclean эффективно очищает адгезивные поверхности протетических реставраций после внутриротовой примерки



☐ **OptraPol**

OptraPol превосходно подходит для финишной обработки и полировки всех известных композитных материалов в один этап



☐ **Cervitec Plus**

Защитный лак, содержащий хлоргексидин и тимол, для защиты обнаженных корней зубов и контролирует рост бактерий



Схема Vivaglass CEM

Имплант - абатмент из оксида циркония - коронка - Оксидная керамика - ретенционная форма абатмента -
Боковой зуб - Vivaglass CEM

1 Предоперационная ситуация




Абатмент фиксируется винтом.

2 Примерка реставрации



Проводится примерка постоянной реставрации. На данном этапе проверяется цвет, точность посадки и окклюзия реставрации.

3 Канал доступа к винту почищен и запечатан.

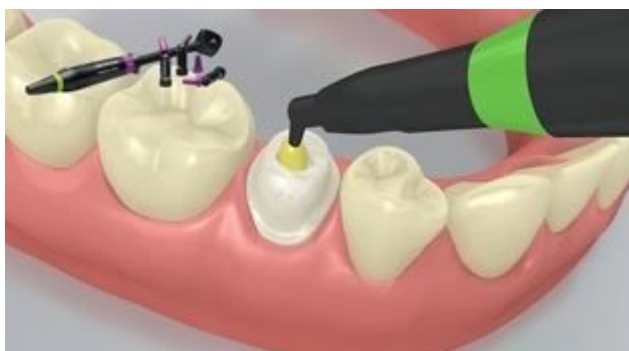

Шахту абатмента тщательно промывают струей воды и сушат воздухом без примесей масла. Далее шахту абатмента закрывают ватным валиком или губкой, а также **Telio CS Inlay**. Для дальнейших этапов лечения, необходимо обеспечить относительную изоляцию рабочего поля, например, при помощи **OptraGate**. Как вариант может использоваться ретракционная нить.

4 Подготовка реставрации



Внутренняя поверхность реставрации подвергается пескоструйной обработке (например, **IPS e.max ZirCAD**, 1 бар, Al_2O_3 100 μm или в соответствии с указаниями производителя реставрационных материалов).

5 Vivaglass CEM замешивается и наносится



Vivaglass CEM порошок и жидкость замешиваются в соотношении 1:1.



Фиксирующий материал наносится на реставрацию при помощи шпателя или кисточки.

6 Реставрация установлена, излишки цемента удалены




Реставрация установлена и удерживается на месте при помощи постоянного легкого давления.



Как только цемент окончательно затвердел, излишки можно удалить, например, при помощи имплантационного скейлера. Установочное время примерно 4-6 минут.

7 Финишная обработка зафиксированной реставрации

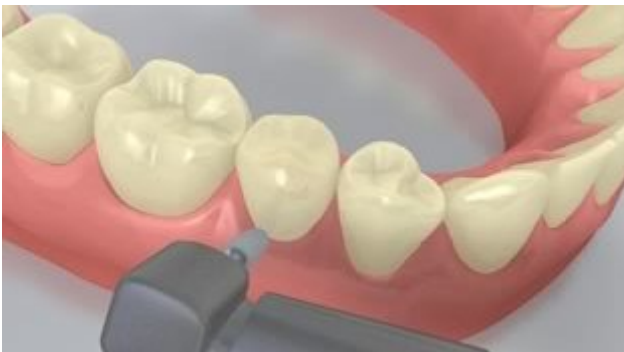

Проксимальные участки корректируются финирами и полирами. Окклюзия и функциональные движения проверяются и корректируются в случае необходимости. Края реставрации полируются полирами (**OptraPol**) или дисками.

8 Последующий уход



Наносится тонкий слой **Cervitec Plus**, где необходимо при помощи аппликатора Vivadent или кисточки. Лак распределяется сам или при помощи струи воздуха.